



בס"ד

חיישן נשימות תינוק בעריסה - Baby-sense

מנגנון שבת

הוראות שימוש

א. עם רכישת מנגנון השבת:

1. הוצא 2 סוללות (בטריות) מתוך 4 הנמצאות במכשיר ה-"Baby-sense", והכנס במקומן את ה"מקל" הנלווה לציוד השבת. שים לב לכיווני ה"פלוס" וה"מינוס", כפי שמסומן.
2. את שתי הסוללות שהוצאו - העבר ל"מנגנון השבת".
3. דאג שהמתג יהיה במצב "חול" (בדגמים החדשים, מתג זה ממוקם בצד המכשיר (בצבע שחור) והוא שקוע בכוונה כדי למנוע את הסטתו בטעות). במצב זה מנגנון השבת 'מחוץ לתמונה'.

ב. לקראת שבת:

1. לחץ על כפתור ההפעלה הראשי במכשיר ה-"Baby-sense". (כפתור זה צריך להיות לחוץ פנימה - מצב חיבור, "ON").
2. העבר את המתג (השחור) במנגנון השבת למצב "שבת".

ג. השימוש בשבת:

1. **לאחר** השכבת התינוק/ת בעריסה הסט את המתג במנגנון השבת למצב "חיבור" ("ON"). בתוך מספר שניות יופעל המכשיר.
2. **לפני** הוצאת התינוק/ת מן העריסה הסט את המתג במנגנון השבת למצב "ניתוק" ("OFF"). בתוך מספר שניות תיפסק פעולת המכשיר.
3. אם הופעל הזמזם בשגגה, הסט את המתג במנגנון השבת למצב "ניתוק" ("OFF") והמתן מספר שניות.