



בס"ד

## חיישן נשימות תינוק בעריסה - Angel-care (עם בטריות)

### מנגנון שבת

### הוראות שימוש

#### **א. עם רכישת מנגנון השבת:**

1. הוצא 2 סוללות (בטריות) מתוך מכשיר ה-"Angel-care", והכנס במקומן את ה"מקלות" הנלוות לציוד השבת. שים לב לכיווני ה"פלוס" וה"מינוס", כפי שמסומן.
2. את שתי הסוללות שהוצאו - העבר ל"מנגנון השבת".
3. דאג שהמתג יהיה במצב "חול" (בדגמים החדשים, מתג זה ממוקם בצד המכשיר (בצבע שחור) והוא שקוע בכוונה כדי למנוע את הסטתו בטעות). במצב זה מנגנון השבת 'מחוץ לתמונה'.

#### **ב. לקראת שבת:**

1. הסט את מתג ההפעלה הראשי במכשיר ה-"Angel-care". (מתג זה צריך להיות במצב חיבור, "ON").
2. העבר את המתג (השחור) במנגנון השבת למצב "שבת".

#### **ג. השימוש בשבת:**

1. **לאחר** השכבת התינוק/ת בעריסה הסט את המתג במנגנון השבת למצב "חיבור" ("ON"). בתוך מספר שניות יופעל המכשיר.
2.  **לפני** הוצאת התינוק/ת מן העריסה הסט את המתג במנגנון השבת למצב "ניתוק" ("OFF"). בתוך מספר שניות תיפסק פעולת המכשיר.
3. אם הופעל הזמזם בשגגה, הסט את המתג במנגנון השבת למצב "ניתוק" ("OFF") והמתן מספר שניות.